



WELCOME TO THE FUTURE OF TAPING

Gezielt Haut und Gewebe mobilisieren



The natural way



Kinesiology Tape:

Eckpfeiler der physiotherapeutischen
Behandlung

**Bereits in den frühen 70er Jahren begann der Siegeszug des Kinesiology Tape.
Es ist es aus der modernen Physiotherapie nicht mehr wegzudenken und wird
seither praktisch unverändert angewendet.**

Höchste Zeit für die Zukunft

Manchmal lösen kleine Innovationen große Fortschritte aus. Gemäß diesem
Prinzip haben wir das klassische SISSEL Kinesiology Tape weiterentwickelt,
um Ihnen völlig neue Behandlungsmethoden zu eröffnen.

Überraschend einfach – verblüffend effektiv

Durch wenige Handgriffe wird aus dem bewährten
SISSEL Kinesiology Tape ein Produkt, dass Ihnen völlig
neue Behandlungsmethoden eröffnet. Durch das speziell
perforierte Abdeckpapier und ein kurzes Falten des Tapes
entsteht eine prägnante „Aktivierungslasche“ auf der Rück-
seite. Diese erlaubt durch Zug- und Kreisbewegungen eine
wirkungsvolle und nachhaltige Manipulation tieferer Haut-
schichten und des Bindegewebes.




**Die durchgehende Aktivierungslasche von Anfang bis Ende
des Tapes erlaubt ein punktgenaues und präzises Greifen.
Genau da, wo Ihre Patient*innen es brauchen.**



EPIFLOW geht unter die Haut

Eine punktgenaue Behandlung tieferer Hautschichten ist die Basis unterschiedlicher Behandlungen, gleichzeitig aber oft schwer umsetzbar. Mit EPIFLOW werden diese Regionen des Körpers im wahrsten Sinne des Wortes „greifbar“.

Wie funktioniert das **SISSEL® EPIFLOW Kinesiology Tape**?

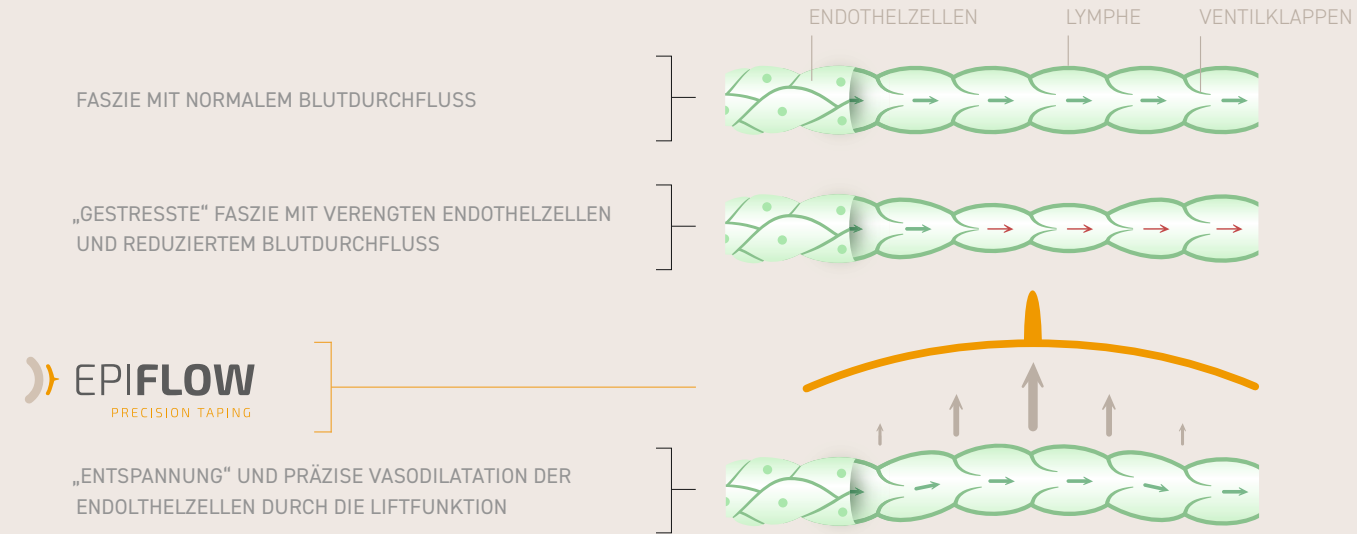

Anwendungsmöglichkeiten des **EPIFLOW**

Allgemeine Aktivierung des Gewebes

Die Anwendung des EPIFLOW Kinesiology Tape aktiviert effektiv Flexibilität und Durchblutung des Gewebes bis in die tiefen Hautschichten und der Lymphfluss wird angeregt.

Lymphödem

Mit dem EPIFLOW Kinesiology Tape ist eine gezielte Behandlung des primären oder sekundären Lymphödems möglich. Durch Applikation im Venenwinkel, oder aber auch an anderen Stellen des lymphatischen Systems kann sich ein positiver Einfluss auf den Lymphfluss ergeben und Schwellungen können reduziert werden.

Anwendung auf Narbengewebe

Ärzte und Physiotherapeuten berichten gleichermaßen von sehr positiven Ergebnissen bei der Anwendung des Tapes für Narben. Durch die regelmäßige Anwendung an bereits verheilten Narben kann das Narbengewebe gelockert und die Durchblutung rund um die Narbe gefördert werden. Patient*innen berichten nach der Anwendung von einem deutlich verbesserten Empfinden und einer sichtbaren und spürbaren Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit.





EPIFLOW richtig anwenden

Die Verwendung des EPIFLOW Kinesiology Tape ist einfach und erfordert nur wenige Schritte mehr als ein herkömmliches Taping.

1. Schutzstreifen abziehen

Entfernen Sie nur den mittleren Schutzstreifen auf der Rückseite des Tapes.



2. Erzeugung der Aktivierungslasche

Falten Sie das EPIFLOW Kinesiology Tape der Länge nach. Durch den entfernten Schutzstreifen in der Mitte des Tapes klebt dieser Teil aufeinander



3. Bearbeitung der Ecken

Um eine optimale Haftung zu gewährleisten und ein ungewolltes Aufrollen zu minimieren, wird das gerade Abschneiden der Ecken empfohlen. Eine Abrundung wie in der herkömmlichen Kinesiologie-Anwendung ist nicht notwendig.



4

4. Anlegen des Tapes

Entfernen Sie nun die beiden restlichen Schutzstreifen des EPIFLOW Kinesiology Tape und legen Sie das Tape OHNE ZUG an. Die notwendige Spannung entsteht später durch die Behandlung.



5

5. Bewegung und Aktivierung

Greifen Sie die Aktivierungsflasche des angelegten EPIFLOW Kinesiology Tape an der Stelle, an der Sie das Gewebe aktivieren wollen. Nun kreisen Sie langsam und kontrolliert unter Beibehaltung der Spannung 5-mal im Uhrzeigersinn, danach 5-mal gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Ablauf an beliebig vielen Stellen entlang des Tape.

Es empfiehlt sich, diesen Ablauf 3x täglich durchzuführen.

Ihre Patient*innen haben die Behandlung selbst „in der Hand“!

Nach einer Einweisung durch eine Fachkraft sind die Patient*innen ohne weiteres in der Lage, die Anwendung selbst durchzuführen.

Durch diese einfache Möglichkeit zur Eigeninitiative wird die Motivation der Patient*innen zur aktiven Mitwirkung an den therapeutischen Maßnahmen gesteigert. Gleichzeitig kann die aktive Auseinandersetzung mit der betroffenen Körperstelle den mentalen und körperlichen Heilungsprozess unterstützen.

Flexibel – auch in der Farbwahl

Das EPIFLOW Kinesiology Tape ist in den beliebten Farben pink, blau, lime green und schwarz erhältlich. Zusätzlich bieten wir Ihnen für die kosmetisch unauffällige Anwendung zwei Hauttöne (hell und dunkel) an.



Sie möchten mehr erfahren?

Sie haben Fragen zum EPIFLOW Kinesiology Tape oder der Anwendung? Schreiben Sie uns einfach an info@epiflow-tape.com

epiflow-tape.com



Vertrieb Deutschland/Österreich:

novacare gmbh
Bruchstraße 48
67098 Bad Dürkheim
Deutschland
Tel. +49 6322 9565-0

sisself.de



The natural way